

NEU!

ZECKENMAUS!

Entfernt mühelos und
vollständig Zecken bei
Mensch und Tier!

oh je!

Die Zeckenmaus
holt mich mitsamt
Kopf raus!

Argh!

Hier sind wir alle
gefangen!

www.ticksmouse.eu

TICKSMOUSE

Zeckenmaus

Made in Germany



1

Anwendung

Für Haus- oder Nutztiere & Menschen.
Entfernt Zecken einfach und schnell ohne Infektionsrisiko und ohne Gebrauch von Chemikalien.

2

Hygienisch

Das Produkt kann mit kochendem Wasser sterilisiert werden.

3

Sicher

Verhindert Infektionen durch das Entfernen der ganzen Zecke ohne dabei den Kopf abzureißen.

4

Einfach

Die Kammer erlaubt das Sammeln der Zecken ohne Kontaktrisiko für Menschen.


5

Medizinische Auswertung

Die Kammer ermöglicht den Transport & die Analyse der Zecke durch den Arzt.

6

In Deutschland entwickelt und getestet

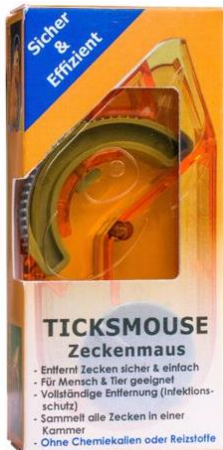

PZN: 19136067



1. Einfach und vollständig Zecken entfernen.

Mit dem V-förmigen Schlitz unter den Zeckenkopf fahren. Zecke herausheben. Die Zeckenmaus mit dem Schlitz nach oben halten, die Zecke fällt in den Behälter. Den Schieber betätigen und die Zecke ist eingeschlossen. Zum Entsorgen den seitlichen Drehschalter betätigen und Deckel abheben. Die Spitze der Zeckenmaus kann heraus gezogen und umgesteckt werden (für kleine oder große Zecken).



2. Zecke in die Schleuse befördern.



3. Verschlussriegel nach vorne schieben und Zecke in die Sicherheitskammer befördern.



4. Verschlussriegel wieder nach hinten schieben.

Die Zecke ist nun absolut sicher eingeschlossen.